

Becutan KIDS VITS Izotonična otopina za nos **Izotonična otopina morske vode za nos, sprej**

Bez konzervansa

Pravilna higijena nosa je važna za bebe, djecu i odrasle. Višak sluzi u nosnim šupljinama može povećati širenje mikroorganizama i pretjeranu suhoću nosne sluznice.

Becutan KIDS VITS Izotonična otopina za nos snažno hidratizira nosnu šupljinu mehaničkim djelovanjem i pomaže u ispiranju i uklanjanju sluzi, što omogućava lakšu propusnost nosne šupljine.

Becutan KIDS VITS Izotonična otopina za nos zadržava izvorna svojstva prirodne morske vode.

Becutan KIDS VITS Izotonična otopina za nos dolazi iz zaljeva Cancale u Bretanji, poznatog po kvaliteti vode. Cancale zaljev ima izrazito visoku plimu (12 m) i jake struje koje sprječavaju zagađenje vode. Zbog ove jedinstvene kombinacije voda se sama pročišćava te je stalno čista. Uzorkovanje se obavlja automatski kada je kvaliteta vode najpovoljnija (nakon plime). Područje uzorkovanja klasificirano je kao klasa A i pod stalnim je zdravstvenim nadzorom (mikrobiološko i kemijsko zagađenje, fitoplankton, pH).

Sastav

Morska voda i pročišćena voda.

Indikacije

Pravilna upotreba **Becutan KIDS VITS Izotonične otopine za nos** u svakodnevnoj higijeni nosa beba, djece i odraslih doprinosi poboljšanju stanja kao što su: nazofaringitis, opstruktivni rinitis i sinusitis, suh nos bez sekreta, promuklost zbog suhe sluznice, te kao pomoć u otorinolaringološkom i pedijatrijskom liječenju.

Upute za korištenje

1. Prije upotrebe protresite bocu i uklonite zaštitni poklopac. Pri prvom korištenju će možda biti potrebno nekoliko puta pritisnuti pumpu spreja kako bi se oslobodio zrak.
2. Nježno stavite vrh spreja u nosnicu i pritisnite pumpu za raspršivanje proizvoda.
3. Pustite da se iscijedi višak otopine kako bi se izlučila sluz, a zatim ispušite nos.
4. Ponovite postupak s drugom nosnicom.
5. Isperite vrh spreja vodom i osušite.
6. Poklopite sprej zaštitnim poklopcem do sljedećeg korištenja.

Nanesite u svaku nosnicu onoliko često koliko je potrebno.

Upozorenje

- Iz higijenskih razloga i radi sprječavanja prijenosa patogena, ovu bočicu ne smije koristiti više osoba.
- Baciti mjesec dana nakon otvaranja.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Čuvati na suhom i hladnom mjestu.
- Ne koristite proizvod nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i bočici.

Opis proizvoda

Becutan KIDS VITS Izotonična otopina za nos 30 ml za bebe i malu djecu starosti od 0 mjeseci do 6 godina.

Preporuka

Za bebe preporučujemo koristiti zajedno s **Becutan KIDS VITS Aspiratorom za nos**.

Datum zadnje revizije teksta: 02-06-2019

**Pharmalink, S.L.**

Av. Universitat Autònoma, 13 – Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès – BARCELONA – ŠPANJOLSKA
www.pharmalink.es – Služba za korisnike: +34 900 102 796

Distributer za Hrvatsku:

Alkaloid d.o.o.,

Slavonska avenija 6 A,

10 000 Zagreb, Hrvatska

CE 0051

LOGO:  **ALKALOID**